


OLVÍDATE DE LA CELULITIS

Si tras completar el tratamiento prescrito, haces alguna sesión esporádica de mantenimiento y la combinas con una dieta equilibrada y algo de ejercicio, mantendrás celulitis y flacidez a raya.

CON EL VELASHAPE II, DE SYNERON CANDELA, SE MEJORAN RESULTADOS Y SE ALARGA SU DURACIÓN. SIN DOLOR Y CON EFICACIA PROBADA EN MULTITUD DE CASOS, ESTA APARATOLOGÍA RENOVADA Y PERFECCIONADA TE PERMITIRÁ DESHACERTE DE LA INCÓMODA Y ANTESTÉTICA CELULITIS, REDEFINIENDO CONTORNOS Y SIN PROBLEMAS DE FLACIDEZ.

UN 80 POR CIENTO DE LAS MUJERES de más de 20 años padece celulitis. Este dato tan significativo hace que las empresas de aparatología profesional se afanen en la búsqueda de nuevas y mejores soluciones para combatir el problema. Como líderes en el mercado de la lipoescultura, Syneron y Candela entienden que la veteranía es un grado, de ahí que VelaShape II™ tenga casi cinco años de experiencia clínica que lo avalan y que lo han convertido en la mejor solución no invasiva para lograr tratamientos corporales seguros y efectivos.

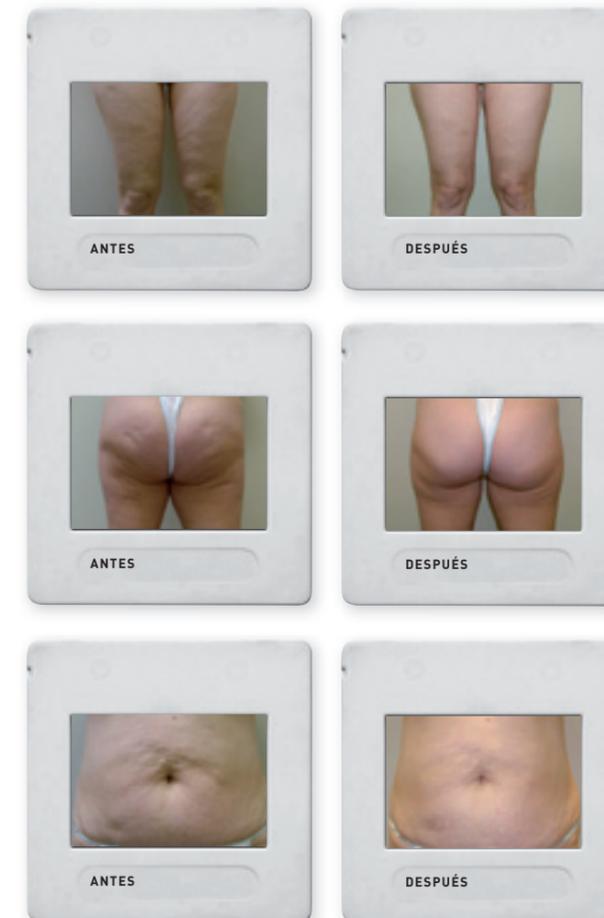

¿QUÉ ES VelaShape II™?

- Es el último tratamiento anticelulitis que combina radiofrecuencia, infrarrojos, succión y masaje para combatir este problema estético tan frecuente entre las mujeres.
- Ha sido aprobado por la CE como una solución no invasiva para la remodelación corporal, la reducción de la circunferencia y de la celulitis de forma temporal.
- Es la respuesta a una gran demanda de mujeres que necesitan tratamientos corporales completos, que incluyan la remodelación de la figura y una reducción considerable de la celulitis.

- SU MEJORA**
- **VelaShape II:** Posee la exclusiva Tecnología TM, capaz de tratar la piel tanto en la superficie como en profundidad, ofreciendo una notable reducción de las capas grasas de la piel y consiguiendo una mejoría de la celulitis.
 - Es un tratamiento no invasivo y sencillo que no requiere de periodo de recuperación.

Lo + nuevo

ADIÓS A LA
CELULITIS REBELDE



¿Cómo funciona el VelaShape II™?

Dispone de diversas intensidades de acción para componer tratamientos personalizados según las necesidades y las características físicas de cada paciente.

- La luz infrarroja (IR) calienta el tejido hasta 5 mm de profundidad.
- La radiofrecuencia (RF) bipolar calienta el tejido que hay entre 2 y cerca de 20 mm de profundidad.



- Los mecanismos de vacío y masaje permiten una administración precisa de la energía en los tejidos.

¿Por qué el nuevo VelaShape II™ mejora los resultados?

Porque su acción aumenta el metabolismo que origina las alteraciones anabólicas y catabólicas deseadas, en zonas cutáneas predeterminadas y a profundidades específicas. Es decir, la destrucción de la grasa se produce en las primeras sesiones y después se va eliminando por los recursos naturales de evacuación que tiene el propio organismo.



CON EL CALENTAMIENTO DE ENERGÍAS IR + RF SE LOGRA...

- 1 Promover la actividad sanguínea y aumenta la disociación del oxígeno de la hemoglobina.
- 2 Aumentar el metabolismo de los adipocitos.
- 3 Facilitar la actividad de los fibroblastos.
- 4 Mejorar la textura de la piel.

CON LA MANIPULACIÓN MECÁNICA DE EFECTOS VACÍO Y MASAJE SE LOGRA...

- 1 Reducir la viscosidad de los cúmulos de células adiposas.
- 2 Estimular la actividad linfática y sanguínea.
- 3 Facilitar la actividad de los fibroblastos (que estimulan la producción de colágeno).
- 4 Promover la vasodilatación y mejor asimilación del oxígeno y de los nutrientes.
- 5 Permitir calentar a distintas profundidades.

5 DUDAS RESUELTAS

• ¿Con qué rapidez notaré el cambio?

Tras el tratamiento se puede observar una mejoría gradual de la zona tratada una vez realizada la primera sesión: la piel de la superficie se nota más suave, firme y dura. Los resultados de la reducción de la circunferencia se ven entre la primera y la segunda sesión y la mejoría de la celulitis en tan sólo 4 sesiones.

• ¿En cuántos centímetros puede reducirse la circunferencia?

En diferentes estudios clínicos se ha obtenido una reducción de hasta 6 centímetros en el abdomen y de 2 centímetros en la circunferencia de los muslos.

• ¿Es seguro el tratamiento?

El tratamiento es seguro y efectivo para todo tipo de pieles y colores de piel. No se han observado efectos nocivos en la salud a corto o largo plazo.

• ¿Duele?

La mayoría de los pacientes consideran que VelaShape IITM es cómodo y agradable, como un masaje caliente profundo de los tejidos. El tratamiento está diseñado para ajustarse a la sensibilidad y nivel de confort de cada paciente. Es normal que experimentes una sensación de calor durante las horas siguientes al tratamiento. Tu piel también puede mostrarse roja durante unas horas, pero no es en absoluto una sensación molesta.

• ¿Son permanentes los resultados?

Tras completar el tratamiento, se recomienda someterse a sesiones de mantenimiento periódicamente. Como es el caso de todas las técnicas, quirúrgicas o no, los resultados serán más duraderos si mantienes una dieta equilibrada y haces ejercicio con regularidad.